

Pilulier semainier Medi-7, blanc



- Pilulier aidant à prendre en temps et en heure les médicaments prescrits par le médecin
- Pour remplir le pilulier, sortir les 7 casiers journaliers de la boîte et faire glisser les couvercles transparents vers la droite jusqu'à la butée afin de libérer les compartiments "matin", "midi" et "soir". Pour libérer le compartiment "nuit", faire glisser le couvercle transparent vers la gauche. Sortir les médicaments de leur boîte d'origine et remplir

les compartiments respectifs.

- Placer en première position du boîtier-doseur le casier rempli, correspondants au jour actuel. Ordonner ensuite les casiers correspondant aux jours suivants en les faisant glisser un à un de l'arrière vers l'avant.
- Entretien: nettoyer dans l'eau chaude avec liquide vaisselle usuel
- Dimensions : 12,5 x 5 x 11,5 cm

