

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour les parties en bois :

- Dépoussiérer à l'aide d'un plumeau pour ne pas griffer le bois
- Ensuite, utiliser un chiffon en microfibres humide et du savon doux



Pour les vinyles et tissus imprégnés (Ginkgo, Silvertex - Permablok) :

- Un entretien régulier avec un savon au PH neutre et une brosse douce permet de conserver l'apparence du revêtement
- Le rinçage doit être fait à l'eau claire et avec un tissu blanc uniquement
- Toute tache, déversement ou salissure doit être nettoyé immédiatement pour éviter l'imprégnation définitive



Méthode de nettoyage pour les taches spécifiques :

Pour chaque type de tache, il est recommandé de frotter de manière circulaire.

- **Café, jus, vin rouge, sauces, chocolat, graisse, crayon et crème solaire :**
 - Enlever l'excédent avec un chiffon humide blanc
 - Nettoyer avec un mélange de 1 :1 de savon liquide neutre et d'eau
 - Rincer à l'eau claire et sécher
- **Maquillage :**
 - Appliquer directement un savon au PH neutre
 - Frotter avec un chiffon blanc ou une brosse douce
 - Rincer à l'eau claire et sécher
- **Sang, urine, matières fécales et autres taches tenaces :**
 - Utiliser un mélange d'alcool isopropylique et d'eau dans une proportion 1 :10
 - Rincer abondamment à l'eau claire et sécher

