

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Voor houten onderdelen :

- Afstoffen met een plumeau om het hout niet te krassen
- Dan, gebruik een vochtige microvezeldoek en milde zeep



Voor vinyls en geïmpregneerde stoffen (Ginkgo, Silvertex - Permablok) :

- Regelmatig onderhoud met een PH-neutrale zeep en een zachte borstel helpt om het uiterlijk van de vloer te behouden
- Alleen afspoelen met schoon water en een witte doek
- Vlekken, morsen of vuil moeten onmiddellijk worden opgeruimd om permanente impregnatie te voorkomen



Reinigingsmethode voor specifieke vlekken :

Voor elke type vlek raden we aan om met ronddraaiende bewegingen te wrijven.

- **Koffie, sap, rode wijn, sauzen, chocolade, vet, potloden en zonnebrandcrème :**

- Verwijder het overtollige met een vochtige witte doek
- Reinigen met een 1 :1 mengsel neutrale vloeibare zeep en water
- Spoelen met schoon water en drogen



- **Schmink :**

- Breng direct een PH-neutrale zeep aan
- Schrob met een witte doek of zachte borstel
- Spoelen met schoon water en drogen



- **Bloed, urine, uitwerpselen en andere hardnekkige vlekken:**

- Gebruik een mengsel van isopropylalcohol en water in een verhouding van 1:10
- Spoel grondig af met schoon water en droog

